

EUCLORINA® GENGIVE



EUCLORINA® GENGIVE COLLUTORIO

Con IALUVANCE™ COMPLEX

Non macchia i denti - Senza clorexidina.
Senza glutine, senza lattosio, senza alcool.

Trattamento delle infiammazioni, sanguinamenti e traumi gengivali del cavo orale. Favorisce la guarigione* e allevia il dolore.

Euclorina® Gengive è un collutorio indicato nelle condizioni di infiammazione e sanguinamento delle gengive, gonfiore, retrazioni, scalature e tasche gengivali, complicazioni associate a procedure dentali e altri traumi tissutali (abrasione, estrazioni dentali, recupero post-chirurgico ecc.). Il prodotto è caratterizzato dalla presenza del complesso Ialuvance™ Complex, associazione brevettata di Acido ialuronico, Perossido di Idrogeno e Glicina.

L'Acido ialuronico è un costituente fondamentale del tessuto connettivo, particolarmente abbondante nelle gengive: questa sostanza ha elevate proprietà idratanti, svolge un ruolo fondamentale in ogni fase della riparazione dei tessuti e fornisce una barriera protettiva sulle ferite e sulle aree infiammate.

Euclorina® Gengive forma una pellicola protettiva, che aderisce alla mucosa orale impedendo ulteriori irritazioni, agendo contro agenti esterni e prevenendo infezioni orali.

Un risciacquo di 30 secondi con Euclorina® Gengive:

- riduce il livello di sanguinamento
- dona immediato sollievo dal dolore
- contribuisce a creare un ambiente microbiologicamente controllato e previene le infezioni batteriche
- contrasta l'insorgere della placca

*promuove il naturale processo di guarigione

Euclorina® Gengive è ideale per mantenere una corretta igiene della bocca e può essere utilizzato per periodi più lunghi rispetto a prodotti contenenti clorexidina, senza discolorare i denti e senza effetti collaterali.

Indicazione d'uso:

Per l'igiene quotidiana della bocca: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi una volta al giorno per un mese.

Per i pazienti con sanguinamenti o gengive doloranti: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi due volte al giorno per un mese.

Per i pazienti che devono sottoporsi ad una procedura professionale di igiene orale: si consiglia di sciacquare la bocca con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi due volte al giorno per un mese.

Per i pazienti che devono sottoporsi ad una procedura ortodontica professionale di igiene orale (curretage, trattamenti di tasche dentali, scalatura gengivale, levigatura radicolare, pulizia sotto gengivale): si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi tre volte al giorno per almeno una settimana.

Per i pazienti sottoposti ad estrazioni dentali: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi tre volte al giorno per una settimana.

Agitare la bottiglia prima dell'uso. Non risciacquare con acqua. Non mangiare o bere per almeno un'ora dopo ogni applicazione. Il prodotto è pronto per l'uso, non necessita di diluizioni.

Avvertenze e precauzioni d'uso: Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata o dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare tra 5°C e 25°C, lontano dal calore diretto.

Non ingerire il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non sono disponibili dati sull'utilizzo nei bambini, negli anziani e nelle donne in stato di gravidanza.


Controindicazioni: Controindicato per i pazienti con ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti.

Reazioni avverse: Studi di biocompatibilità non hanno evidenziato alcun effetto collaterale: in ogni caso, se si dovesse verificare una qualsiasi reazione avversa, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Ingredienti: aqua, hydrogen peroxide, PEG-40 hydrogenated castor oil, xanthan gum, VP/dimethiconylacrylate/polycarbamyl polyglycol ester, glycine, sodium hyaluronate, sodium saccharin, aroma, oxyquinoline sulfate, limonene, phenoxyethanol, caprylyl glycol, hexylene glycol.

Contenuto: flacone 200 ml.

	Conservare tra 5°C e 25°C
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Marchio CE rilasciato dall'organismo di notifica 0477
	Vedere il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto
	Fabbricante
	Tenere lontano da calore diretto
	Non utilizzare se la confezione è aperta e/o danneggiata

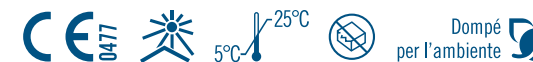

Fabbricante:

BMG Pharma S.p.A.
Viale Restelli 1,
20124 Milano ITALIA

Distribuito in Italia da:
Dompé farmaceutici S.p.A.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO			
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Astuccio PAP21	Foglietto illustrativo PAP22	Flacone PET01	Capsula - Misurino Etichetta - PP05
CARTA	CARTA	PLASTICA	PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo comune.			

Rev. 2, 14 Dicembre 2020