

EUCLORINA® GENGIVE e AFTE



EUCLORINA® GENGIVE E AFTE COLLUTORIO

Non macchia i denti - Senza clorexidina.
Senza glutine, senza lattosio, senza alcool.

Trattamento delle infiammazioni gengivali, sanguinamenti, lesioni e traumi del cavo orale. Favorisce la guarigione* e allevia il dolore.

Euclorina® Gengive e Afte è un collutorio indicato nelle condizioni di infiammazione e sanguinamento delle gengive, gonfiore, retrazioni, scalature e tasche gengivali, lesioni e complicazioni associate a procedure dentali e altri traumi tissutali (abrasione, afte, estrazioni dentali, recupero post-chirurgico ecc.).

L'acido ialuronico è un costituente fondamentale del tessuto connettivo, particolarmente abbondante nelle gengive: questa sostanza ha elevate proprietà idratanti, svolge un ruolo fondamentale in ogni fase della riparazione dei tessuti e fornisce una barriera protettiva sulle ferite e sulle aree infiammate.

Euclorina® Gengive e Afte forma una pellicola protettiva che aderisce alla mucosa orale impedendo ulteriori irritazioni, agendo contro agenti esterni e prevenendo le complicazioni causate dalle infezioni orali.

Un risciacquo di 30 secondi con Euclorina® Gengive e Afte:

- riduce il livello di sanguinamento
- dona immediato sollievo dal dolore
- previene le infezioni batteriche
- contrasta l'insorgere della placca
- crea un effetto barriera fino a 8 ore**

*promuove il naturale processo di guarigione

** basato su uno studio in vitro

Euclorina® Gengive e Afte è ideale per mantenere una corretta igiene della bocca e può essere utilizzato per periodi più lunghi rispetto a prodotti contenenti clorexidina, senza discolorare i denti e senza effetti collaterali.

Indicazione d'uso:

Per l'igiene quotidiana della bocca: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi una volta al giorno per un mese.

Per i pazienti con sanguinamenti o gengive doloranti: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi due volte al giorno per un mese.

Per i pazienti che devono sottoporsi ad una procedura professionale di igiene orale: si consiglia di sciacquare la bocca con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi due volte al giorno per un mese.

Per i pazienti che devono sottoporsi ad una procedura ortodontica professionale di igiene orale (curettage, trattamenti di tasche dentali, scalatura gengivale, levigatura radicolare, pulizia sotto gengivale): si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi tre volte al giorno per almeno una settimana.

Per i pazienti sottoposti ad estrazioni dentali: si consiglia di sciacquare con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi tre volte al giorno per una settimana.

Per i pazienti con afte: si consiglia di sciacquare la bocca con 10 ml di prodotto non diluito per 30 secondi due-tre volte al giorno.

Agitare la bottiglia prima dell'uso. Non risciacquare con acqua. Non mangiare o bere per almeno un'ora dopo ogni applicazione. Il prodotto è pronto per l'uso, non necessita di diluizioni.

Avvertenze e precauzioni d'uso: Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata o dopo la data di

scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare tra i 5°C e i 25°C, lontano dal calore diretto. Non ingerire il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non sono disponibili dati sull'utilizzo nei bambini, negli anziani e nelle donne in stato di gravidanza.

Non sono disponibili dati relativi all'uso concomitante di farmaci, in caso di trattamenti concomitanti consultare il medico. In caso di reazioni avverse durante l'uso sospendere il trattamento e consultare il medico.

Controindicazioni: Controindicato per i pazienti con ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti.




Reazioni avverse: Studi di biocompatibilità non hanno evidenziato alcun effetto collaterale: in ogni caso, se si dovesse verificare una qualsiasi reazione avversa, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

In caso di qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo è necessario segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente locale.


Ingredienti: Acqua, Ialuronato di Sodio 0,1%, Perossido d'Idrogeno, Glicina (Ialuvance®Complex), PEG-40, Olio di Ricino Idrogenato, Gomma Xantano, VP/Dimeticonilacrilato/Polycarbamil Poliglicole Estere, Saccarina Sodica, Aroma, Idrossichinolina Solfato, Limonene, Fenossietanolo, Glicole Caprilico, Glicole Esilenico.

Contenuto: flacone 200ml 

Con misurino dosatore CE0373 – fabbricante: Bormioli Pharma

	Conservare tra 5°C e 25°C
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Marchio CE rilasciato dall'organismo di notifica 0477
	Marchio CE rilasciato dall'organismo di notifica 0373
	Vedere il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto
	Produttore
	Identificatore Univoco del Dispositivo
	Dispositivo Medico
	Tenere lontano da calore diretto
	Non utilizzare se la confezione è aperta e/o danneggiata



 **BMG Pharma S.p.A.**
Via De Castillia 23, 20124 Milano Italia

Distribuito in Italia da:
Dompé farmaceutici S.p.A.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO			
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Astuccio PAP21 CARTA	Foglietto illustrativo PAP22 CARTA	Flacone PET01 PLASTICA	Misurino dosatore Tappo - Etichetta - PP05 PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo comune.			

Rev.4, Marzo 2024